

Hoe start ik een NeuroSupport Thuis training

1 **Overzicht van de materialen**

Pasta zAmp & USB cable Laptop

2 **Start NeurOptimal®**

Start NeurOptimal® door op de NeurOptimal® icon in de onderste taakbalk te klikken

Vault Media Player

3 **Sluit de USB kabel aan op de zAmp en laptop.**

4 **Bevestig de sensoren op de zAmp en hoofd.**

Let op kleurcodering en oriëntatie links/rechts

5 **Dubbele klik op "Client" om een naam toe te voegen**

6 **Dubbele klik op je naam om te starten**

BELANGRIJK
Laat het system verbonden met het WiFi - netwerk